

# FILTRAIR®

## PREVENT

### Filtrair® Prevent 800 mg

Composição: Celulose em pó natural inerte e pó de hortelã.

Barreira contra Antígenos e Alérgenos causadores de Rinite Alérgica.

**Filtrair® Prevent** é um spray nasal em pó que se transforma em película protetora, criando uma barreira para proteger a mucosa nasal dos antígenos e alérgenos transportados pelo ar e poluição, capazes de provocar sintomas da rinite alérgica como espirros, coriza e congestão nasal.

### Quando devo usar Filtrair® Prevent?

**Filtrair® Prevent** é um spray nasal em pó que se transforma em uma película protetora, criando uma barreira para proteger a mucosa nasal dos alérgenos transportados pelo ar e pela poluição.

Portanto, é um tratamento preventivo na luta contra as alergias - devendo ser utilizado antes de entrar em contato com alérgenos, para evitar que estes se instalem na mucosa nasal e deem início à resposta alérgica. Está clinicamente comprovado que o **Filtrair® Prevent** reduz os espirros, a coriza e a congestão nasal em pacientes com rinite alérgica leve a moderada.

O **Filtrair® Prevent** tem que ser aplicado 2 a 3 vezes por dia para manter uma barreira eficaz. O **Filtrair® Prevent** pode durar 6 horas por aplicação. Se a exposição acontecer com maior frequência, ele pode ser usado com frequência maior.

Se for necessário o uso concomitante de outro spray nasal, **Filtrair® Prevent** deve ser reaplicado posteriormente, para que a barreira criada não seja afetada.

**Filtrair® Prevent** pode ser usado associado a outros medicamentos, como parte de uma terapia combinada contra as alergias.

### Quem pode usar Filtrair® Prevent?

**Filtrair® Prevent** pode ser usado em adultos e crianças acima de 18 meses. Podendo ser usado também em mulheres grávidas e lactantes. Manter fora do alcance das crianças.

**Filtrair® Prevent** não contém nenhuma substância com ação farmacológica.

**Filtrair® Prevent** tem um bom perfil de segurança.


**Filtrair® Prevent** não causa sonolência.

### Como Filtrair® Prevent funciona?


**Filtrair® Prevent** é um spray nasal em pó.

O pó cria uma barreira para proteger de antígenos/alérgenos transportados pelo ar e pela poluição.


Essa proteção da mucosa nasal evita o início da reação alérgica (liberação de substâncias inflamatórias como a histamina e Ig-E), o que por sua vez, impede os sintomas desagradáveis das alergias.

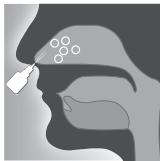

Spray Nasal

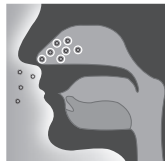

Inalar para formar  
a película protetora

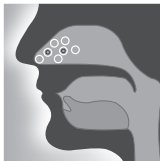

Película protetora  
contra antígenos /  
alérgenos e poluição

A ação do **Filtrair® Prevent** de 3 a 6 minutos foi comprovada através de estudos clínicos.

### Como usar Filtrair® Prevent?

O **Filtrair® Prevent** tem que ser aplicado 2 a 3 vezes por dia para manter uma barreira eficaz. O **Filtrair® Prevent** pode durar 6 horas por aplicação. Se a exposição acontecer com maior frequência, ele pode ser usado com frequência maior a critério do profissional de saúde.

A frequência do uso de **Filtrair® Prevent** pode ser afetada pela proximidade dos alérgenos e de acordo com a gravidade da alergia do paciente.

Lembre-se de usar **Filtrair® Prevent** antes do início dos sintomas.




#### Passo 1:

Assoe seu nariz.



#### Passo 2:

Remova a tampa e agite o frasco lateralmente.

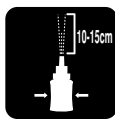**Passo 3:**

Administre um spray de teste para medir a pressão necessária para uma dose ideal, que é uma nuvem de pó de 10 a 15cm. Se você achar o frasco muito duro para pressionar com apenas uma mão, use as duas mãos (depois que já estiver no tratamento com o **Filtrair® Prevent**, o spray de teste não é mais necessário).

**Passo 4:**

Coloque o bico do frasco dentro do nariz e aplique de 1 a 2 sprays em cada narina. Inale gentilmente ao pressionar, mas não inale profundamente.

**Passo 5:**

Aplique novamente toda vez que assoar seu nariz.

Durante o primeiro uso, você pode sentir um formigamento ou sensação de queimação no nariz ou espirros leves. Esta é uma sensação transitória que desaparece à medida que você se acostuma a usar **Filtrair® Prevent**. Você também pode sentir alguma forma de irritação, especialmente se as suas membranas nasais já estiverem inflamadas ou irritadas, esta sensação vai desaparecer rapidamente.

Algumas pessoas podem sentir uma leve sensação de nariz entupido, isso é normal e é a sensação da barreira criada pelo **Filtrair® Prevent**.

Se sentir algum desconforto após a aplicação consulte o seu médico.

Se for necessário o uso concomitante de outro spray nasal, **Filtrair® Prevent** deve ser reaplicado posteriormente, para que a barreira criada não seja afetada.

Se **Filtrair® Prevent** não aliviar adequadamente seus sintomas, consulte seu médico sobre qual medicamento você pode tomar para complementar o seu tratamento contra as alergias.

Se você não usou este produto antes da reação alérgica, aguarde a sua resposta alérgica diminuir cerca de 30 minutos, depois tente novamente.

Leia atentamente as orientações acima e use **Filtrair® Prevent** seguindo as 5 etapas.

Como conservar **Filtrair® Prevent**:

Não molhe o frasco com água ou outros líquidos, pois isso pode entupir o frasco.

Sempre recoloca a tampa.

Armazenar em temperatura ambiente entre 15° e 30°C em local seco e arejado.

Uma vez aberto, use dentro de 6 meses.

Não refrigerar ou congelar.

**Contraindicações**

Não é adequado para crianças menores de 18 meses. Não use este produto se for sensível à celulose e/ou hortelã.

Evite contato com os olhos.

Se o pó entrar em contato com os olhos, lave com água.

Evite o contato com feridas abertas.

Para evitar contaminação, não recomendamos a utilização deste produto por mais de uma pessoa.

Pouquíssimos casos de reações alérgicas a este produto foram relatados. Os relatos mínimos recebidos foram nariz entupido, nariz escorrendo, espirros e dor de garganta. Se você apresentar reações mais severas do que essas, o uso do produto deve ser descontinuado imediatamente e se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.

Fabricado por:

Nasaleze Ltd, Unit 3, Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, Isle of Man, IM44QE, Reino Unido.

Importado por:

ZAMBON Laboratórios Farmacêuticos Ltda.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041

Bloco E - 5º Andar

Vila Olímpia - São Paulo - SP

CEP: 04543-011

CNPJ: 61.100.004/0001-36

Farm. Resp.:

Juliana Paes de O. Rodrigues

CRF-SP: 56.769

Registro ANVISA nº: 80462650001.

Atendimento ao consumidor  
**0800-0177011**  
[www.zambon.com.br](http://www.zambon.com.br)

